



USO DE TERMÓMETRO DE INFRARROJOS EN LAS ERTZAI-ETXEAS

Este documento acompaña al termómetro de infrarrojos y a su manual de instrucciones. El termómetro estará a disposición de la/el JO en cada ertzain-etxea.

El objeto de su distribución es para que cuando alguien en el centro presente síntomas relacionados con el COVID-19, o crea presentarlos, tomar uno de los indicadores como es la Temperatura.

INSTRUCCIONES DE USO Y AJUSTES.

Antes de ponerlo en funcionamiento leer el manual de instrucciones atentamente.

- Colocar la pila.
- Situar la persona a la que se le va a tomar la temperatura de perfil, de manera que nunca incida el haz de luz en el ocular.
- Eliminar el sudor si lo hubiera y quitarse las gafas quien las use, para que nada interfiera en entre el termómetro y la superficie a medir.
- Verificar que el valor de la medición se da en "°C" grados centígrados.
- Pulsar el botón Laser para encender o apagar el puntero láser.
- Se apaga automáticamente si no se pulsa ningún botón.

CUANDO HAY QUE UTILIZARLO

Cuando un agente refiera malestar y/o presente síntomas relacionados con el COVID-19 se medirá la temperatura.

Si el valor de la medición es mayor a 37°C, la/el ertzaina deberá volver a su domicilio, llamar al centro de salud de atención primaria y al Servicio de Prevención y seguir las indicaciones del personal sanitario.

Nota: Este producto mide la temperatura corporal solo como valor referencial.

Erandion, 2020ko apirilaren 1ean